



Ytdesinfektion Special 45

Ytdesinfektion Special 45 är ett desinfektionsmedel med rengörande verkan för släta ytor, metallföremål och instrument. Innehåller korrosionsskydd. Ytdesinfektion Special 45 används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via ytor och föremål, t ex inom verksamhetsområden som tandvård, humanvård, djurvård, och laboratorier.

Produktfakta

Ytdesinfektion Special 45 är ett ytdesinfektionsmedel med en tillsats av tensid som gör att den får en rengörande effekt. Den innehåller även ett korrosionsskydd som förhindrar att metaller rostar/ärgar. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och virus. Innehåller 45 volym% isopropylalkohol. Produkten uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel EN1276.

Bruksanvisning

Ytdesinfektion Special 45 används utspädd.

Ytor: Spruta ut desinfektionsmedlet på ytan som ska desinficeras och stryk noggrant ut medlet med en torkduk eller luddfritt papper. Låt desinfektionsmedlet verka minst 1 min. Ytan ska självtorka.

Metallföremål/Instrument: Föroreningar torkas av och föremålet sänks ner under vätskeytan och blötläggs i minst 5 min.

Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning.

Innehåll

Aqua, Isopropyl Alcohol, Cocamidpropylamine Oxide, Sodium Tolytriazole

Lagring/Hållbarhet

Förvaras i väl tillslutna flaskor. Obruten förpackning har en garanterad hållbarhet på minst tre år. Öppnad förpackning håller minst 12 månader.

Miljö

Samtliga förpackningar är av miljövänlig återvinningsbar polyeten. Hela förpackningen sorteras som "förpackning av plast"



Artiklar

17120001

1000 ml flaska

Ant/tp: 12



Lahega Kemi AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg,
Telefon 042-256700, Telefax 042-256750
www.lahega.se