



Dispenserplatta Säng

Dispenserplatta Säng används för att enkelt kunna hänga *Dispenserhållare Säng, 600 ml* på patientsängar eller liknande ytor för att ha flaskor nära tillhands.

Produktfakta

Dispenserplatta Säng är tillverkade av rostfritt stål.

Bruksanvisning

Dispenserplatta Säng skruvas fast på patientsäng eller dyl. Dispenserhållaren placeras därefter enkelt på plattan.

Övrigt

Rengöres vid behov eller i samband med flaskbyte.

Fukta en pappersduk med LIV Ytdesinfektion +45 och torka noggrant av *Dispenserplatta Säng*. Låt därefter plattan lufttorka.



Artiklar

73465

1 st

Ant/ftp: 1



Lahega Kemi AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg,
Telefon 042-256700, Telefax 042-256750
www.lahega.se